

1



MASCARILLA REUTILIZABLE

2



- No utilizar lejía, podría afectar a las características hidrófugas del tejido.
- Sólo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar extento de colorantes.
- Sólo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario utilizar el pre-lavado.

3



- Utilizar nivel de agua medio en el lavado.
- Tiempo de lavado: 10 minutos.
- Temperatura de lavado: inferior a 35°C.
- Detergente humectante.
- pH: ligeramente alcalino, no superior a pH10.

4



- Enjuague sólo con agua. 4 ciclos.
- El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su factor K.
- Puede utilizarse secadora. Este proceso puede realizarse hasta 60°C, sobrepasar esta temperatura podría afectar al género.