



SOPORTE TERMOINDUCTOR CUELLO IRISANA IR10

REFERENCIA: 72.IR10

EAN 8463721300101



Este soporte contiene gemas de turmalina, partículas de cerámica y otros materiales naturales inductores de calor.

En contacto con la piel, estos materiales reaccionan desprendiendo calor, rayos infrarrojos e iones negativos que penetran en profundidad y relajan la zona.

Aplicaciones.

Cuando se prescriba la aplicación de calor. Alivia molestias musculares de la zona cervical.

Modo de empleo.

Humedecer el soporte con agua en la parte del tejido con puntos y colocarlo en torno al cuello de modo que resulte cómodo y, a la vez, tenga el mayor contacto posible con la piel.

Generalmente a los 15 minutos se comienza a sentir calor.

Debido al calor producido por los rayos infrarrojos que penetran en profundidad, podemos apreciar la sensación de calor bastante tiempo después de haber retirado el soporte, lo que proporciona un efecto agradable, relajante y muy beneficioso.

También puede usarse sin mojar, pero en este caso, será necesario más tiempo para apreciar los mismos efectos.

Se aconseja humedecerlo con agua sin cloro, pues este podría producir molestias en la piel.

Debe lavarse sin detergentes, solamente con agua para no dañar su eficacia.

Observaciones.

No se recomienda el uso a mujeres embarazadas ni a personas con prótesis metálicas en la parte del cuello.

En caso de que la sensación de calor resulte excesiva, retire inmediatamente el soporte.